

Rover-laitteen puhdistaminen

<p>Hoitotyössä käytettäviä Rover- ja muiden ATK-laitteiden käytössä noudatetaan hyvää käsihygieniaa.</p>	
<p>Käsihygienia Roverin kanssa työskennellessä</p>	<p>Muista normaalit käsihygieniaa edellyttävät tilanteet myös Roverin kanssa!</p> <p>Desinfioi kädet - katso Desinfektiotekniikka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ennen kuin kosketat potilasta tai hoitoympäristöä • Välittömästi ennen aseptista toimenpidettä (esim. Roverin koskettamisen jälkeen ennen kuin annan iv-lääkettä) • Välittömästi eritteiden käsittelyn jälkeen (ennen kuin kosketat muuta, esim Roveria) • Potilaan/potilaan lähiympäristön koskettamisen jälkeen <ul style="list-style-type: none"> • Ennen elintarvikkeiden käsittelyä • WC-käynnin jälkeen <p>Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien desinfektiota. Kädet desinfioidaan aina ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.</p>
<p>Rover-laitteet puhdistetaan pesevällä pintadesinfektioiinalla huolellisesti pyyhkimällä. Puhdistukseen ei sovellu desinfektioaine, jossa on alkoholia (esim. ApoWipe Ethanol Disinfection Mini).</p> <p>Laite puhdistetaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potilashuoneesta poistuttaessa • aina käytön jälkeen, jos sitä on käsitelty desinfioimattomin käsin tai se on laskettu hoitoympäristössä esim. potilaspöydälle (näin potilaan mikrobit eivät leviä eteenpäin) • aina kun laite laitetaan latautumaan <p>Puhdistaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • desinfioi kädet • pue kertakäyttöiset suojakäsineet • puhdista laite desinfektioiinalla huolellisesti • poista suojakäsineet • desinfioi kädet 	