

Silmäsuojainten ja kasvovisiirien puhdistusohje

Silmäsuojaimia tai kasvovisiiriä käytetään pisara- ja ilmavarotoimissa potilaan läihoidossa tarvittaessa.

Osa silmäsuojaimien ja kokokasvovisiirien sangoista ovat monikäyttöisiä ja ne voidaan puhdistaa pyyhkimällä tai koneellisesti. Sangat kerätään potilashuoneissa ja viedään huoltohuoneeseen puhdistettavaksi. Irrotettavaa visiiriä ei puhdisteta, se on kertakäyttöinen. Jokaisen käytön jälkeen vaihdetaan uusi visiiri. Jos kasvovisiirissä on vaahtomuovi pehmuste, on se aina kertakäyttöinen.



Koneellinen pesu instrumenttikoneessa tai lähetetään välinehuoltoon geelattuna:

- Poista visiiri sangoista.
- Laita sangat laitteen pesukoriin.
- Pesu instrumenttikoneessa (90-92 astetta).
- Pestyt sangat otetaan desinfioiduin käsin pois koneesta.

Sankojen puhdistus pyyhkimällä:

- Desinfioi kädet.
- Pue kertakäyttöiset suojakäsineet.
- Puhdista sanka desinfektioliinalla tai desinfektioaineeseen kostutetulla kertakäyttöliinalla.
- Poista suojakäsineet.
- Desinfioi kädet.

Puhdistetut silmäsuojaimien ja kasvovisiirien sangat säilytetään puhtaassa tilassa/astiassa