

Pintadesinfektioaineet

Pintadesinfektioaineet lääkinnällisten laitteiden ja välineiden sekä infektioiden torjunnan kannalta kriittisten pintojen desinfiointiin. Muista merkitä tuotteen käyttöönottopäivämäärä ja/tai valmistajan antama voimassaoloaika avaamisesta. Vaikutusaika on pinnan pyyhintään ja kuivumiseen kulunut aika, jos ei muuta mainita. **Käytä suojakäsineitä ihon suojaamiseksi.** Noudata lisäksi valmistajan puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Tutustu myös Eritehradesinfektio-ohjeeseen Kaksivaiheinen eritetehradesinfektio

Keskusvarastotuote Valmistenimi ja vaikuttava aine	Pitoisuus ja säilyvyysajat	Käyttötarkoitus
Oxivir Plus Spray (peroxygeeni) 750 ml	3,5 % vaahto, valmis käyttöliuos. Säilyvyys 2 vuotta.	Pesevä desinfektioaine, eritetehradesinfektio ja pintadesinfektio. Tehoaa Acinetobacter baumanniiin, norovirukseen, tbc.
Oxivir Plus (peroxygeeni) 1l ja 5l	3,5 % laimennettu käyttöliuos, 35ml + 965ml viileää vettä Säilyvyys 1 vuosi. 15 % laimennettu käyttöliuos, 150ml + 850ml viileää vettä Säilyvyys 1 vuosi.	Kuten yllä. Kuten yllä, teho itiöihin (Cl. difficile). CPE ja ESBL Klebsiella pneumoniae potilashuoneen loppusiivoukseen.
Erisan Oxy+ (vetyperoksidi ja peretikkahappo)	2% laimennettu puhdas käyttöliuos, 1 annospss + 2,5l lämmintä vettä. Säilyvyys 1 viikko. 5% laimennettu puhdas käyttöliuos, 1 annospss. + 1l lämmintä vettä. Säilyvyys 2 vrk.	Pesevä desinfektioaine, välineiden liotus, eritetehradesinfektio ja pintadesinfektio. Tehoaa norovirukseen, Cl. difficileen, tbc. Kuten yllä. Tehoaa Candida albicans.
Tevan Panox 200 (vetyperoksidi ja peretikkahappo) 750 ml spray ja 5l	Valmis käyttöliuos. Säilyvyys 2 vuotta.	Eritetehradesinfektio ja pintadesinfektio. Tehoaa norovirukseen.

Virkon (peroksygeeni) 10g jauhepussi ja 1kg	1% laimennettu käyttöliuos. 10g jauhetta + 1l haalea n.25°C asteinen vesi. Säilyvyys 5 vrk.	Puhdistus- ja eritetahradesinfektio, väli- neiden liotus. Vaikutusaika 10 min. Tehoa norovirukseen, MRSA, VRE, Candida albic.
Klorilli (kloramin-T) 1l ja 5l	1000 ppm 50ml + 950ml viileää vettä Puhdas käyttölaimeenosliuos. Säilyvyys 4 viikkoa.	Pesevä erikoisdesinfektio- ja pinta- desinfektioaine. Tehoa Acinetobacter baumanniin, norovirukseen, Cl. difficile, tbc.

Pintadesinfektioli- nat	Pitoisuus ja säilyvyysajat	Käyttötarkoitus
Oxivir Excel Wipe (peroxygeeni)	Avattu pakkaus säilyy 28 vrk. Merkitse käyttöönottopäivä pakkaukseen.	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfek- tioliina, vettä kestäville pinnoille, alko- holiton. Tehoa adeno- ja noroviruk- seen.
WipeClean Alco Free Disinfection (triamine)	Avattu pakkaus säilyy max. 6kk. Merkitse käyttöönottopäivä pakkaukseen.	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfek- tioliina, vettä kestäville pinnoille, alko- holiton. Kosteaa ja vaahtoava liina. Isoille pinnoille. Tehoa noroviruk- seen, Cl.difficileen.
WetWipe Triamin Disinfection (triamin)	Avattu pakkaus säilyy 30 vrk. Merkitse käyttöönottopäivä pakkaukseen.	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfek- tioliina, vettä kestäville pinnoille, alko- holiton. Ei tehoa Cl.difficileen, noro- adeno- ja rotavirukseen.
ApoWIPE Sporicidal Disinfection	Avattu pakkaus säilyy 30 vrk. Merkitse käyttöönottopäivä pakkaukseen.	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfek- tioliina, vettä kestäville pinnoille, alko- holiton. Tehoa Cl.difficileen, noro- adeno- ja rotavirukseen.
ApoWIPE Ethanol Disinfection Mini 15x14 cm	Avattu pakkaus säilyy 7 vrk. Merkitse käyttöönottopäivä pakkaukseen.	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfek- tioliina, alkoholia kestäville pienille pin- noille.

ApoWIPE Ethanol 80% 12x18 cm	Etanoli 80%. Yksittäispakattu steriili liina.	Etanoliliina kanyylikorkkien, injek- tioporttien sekä liittimien desinfiointiin. Vaikutusaika 30 sek. Tehoaa noroviruk- seen.
Apteekkituote	Säilyvyys	Käyttötarkoitus
Easydes (etanoli) 500ml ja 5l	Etanoli 60p-%. Säilyvyys 3 vuotta valmistusajankohdasta.	Pesevä desinfectioaine alkoholia kestä- ville pinnoille, ei välineliotukseen. Ei te- hoa Cl.difficileen.
Desinfektol P (etanoli) 100ml ja 500ml	Etanoli 70p-%. Säilyvyys 5 vuotta, avattuna 2 vuotta.	Etanolipohjainen pintadesinfectioaine kuiville pinnoille, ei välineliotukseen. Ei tehoa Cl.difficileen.
Bactacid AF (etanoli) 500ml ja 5l	Etanoli 72p-%. Valmis käyttö- liuos.	Etanolipohjainen pintadesinfectioaine. Vaikutusaika 30 sek. Tehoaa adeno-, rota- ja norovirukseen.
OL Antistaatti 100ml suihkepullo	Isopropyylialkoholi 40p-%. Säi- lyvyys 2 vuotta, avattuna 1 vuosi.	Etanolipohjainen liuos näppäimistön ja hiiren desinfectioivaan puhdistukseen (huom. valikoimissa hankintakauden loppuun).