

Pintadesinfektioaineet

Desinfektiopyyhkeet voidaan jakaa kolmeen ryhmään vaikuttavan aineen perusteella: vetyperoksidipohjaiset pyyhkeet, alkoholia ja pesuainetta sisältävät pyyhkeet ja kvattipohjaiset pyyhkeet. Jos ei tarvita desinfektioitehoa, kannattaa käyttää yleispuhdistuspyyhettä.

Vetyperoksidi ja alkoholi ovat teholtaan lähellä toisiaan ja tehokkaampia kuin kvatit. Jos desinfioitava laite kestää vetyperoksidia tai alkoholia, kannattaa ensisijaisesti valita joko vetyperoksidipohjainen tai alkoholipohjainen tuote.

Lääkinnällisten laitteiden pintadesinfektioon saa käyttää vain pyyhettä, joka on rekisteröity lääkitseväksi laitteeksi. Ensisijainen pyyhe on silloin vetyperoksidipohjainen Oxi-vir Excel Wipe ja mikäli pinta ei kestä vetyperoksidia, pyyhkeeksi valitaan kvattipohjainen desinfektiopyyhe Mikrozid Sensitive Premium Wipe.

1. Ensisijaiset desinfektioaineet ja -pyyhkeet

1.1. Alkoholi+pesuaine

	ApoWIPE Ethanol Disinfectio Mini Tilausnro: Z021841	Säilyy avattuna 7 vrk Pyyhkeen koko: 15x14 cm 10 pyyhettä / paketti LTK / 20 pakettia
	Desioil 75 p% Tilataan apteekista Käytetään esim. kertakäyttöisen mikrokuituliinan kanssa	Säilyy 5 v, avattuna 2 v 500 ml
	Desinfektol 70 p% Tilataan apteekista Käytetään esim. kertakäyttöisen mikrokuituliinan kanssa	Säilyy 5 v Avattuna 2 v 100 ja 500 ml

 Pro Easydes Tilausnro: Z8081 Käytetään esim. kertakäyttöisen mikrokuituliinan kanssa	Säilyy 3 v 500 ml ja 5 l ltk / 6 pulloa
 KW Des Bright spray Tilausnro: Z1836205 Käytetään esim. kertakäyttöisen mikrokuituliinan kanssa	500 ml ltk / 6 pulloa
1.2. Vetyperoksidi	
 Oxivir Excel Wipe Tilaus nro: Z100984248	Säilyy avattuna 28 vrk Pyyhkeen koko: 20 x 27 cm 100 pyyhettä / paketti Myös lääkinnällisille laitteille
 Saniswiss Sanitizer S1 Tilaus nro: Z70003108 Tehoaa myös itiöihin	Säilyy avattuna 2 kk Pyyhkeen koko: 20 x 20 cm 100 pyyhettä / paketti

2. Jos alkoholia tai vetyperoksidia ei voi käyttää

2.1. Kvattipohjainen (herkille tuotteille ja pinnoille)

Mikrozyd Sensitive Premium Wipe



Tilausnro:
Z70003108

Säilyy avattuna 3 kk

Pyyhkeen koko: 20x20 cm
100 pyyhettä / paketti

Myös lääkinnällisille laitteille

3. Tilanteissa, joissa ei tarvita desinfektiota, vaan riittää puhdistuspyyhe

3.1. Yleispuhdistusaine, ei desinfektiotehhoa



Pro Wipes

Tilausnro Z15912086

Säilyy avattuna 3 kk

Pyyhkeen koko: 20 x 30 cm

25 pyyhettä / paketti

LTK / 21 pakettia

4. Eritetahradesinfektioaineet



Oxivir Sporicide

(vetyperoksidi) 750 ml
Tilausnro Z100934091

6 % vaahto, valmis käyttöliuos

Säilyvyys: 2 vuotta

6 kpl / laatikko

Tehoaa itiöihin



Oxivir Plus

(vetyperoksidi)
1 l Z100826547
5 l Z100827422

3,5 % laimennettu käyttöliuos

35 ml + 965 ml viileää vettä

Säilyvyys: 1 vuosi.

15 % laimennettu käyttöliuos,

150 ml + 850 ml viileää vettä

Säilyvyys: 1 vuosi, **tehoaa itiöihin**

 Pro Klorilli (kloramin-T) 1 l Z8109/3 5 l Z8110/1	1000 ppm laimennettu käyttöliuos, 50 ml + 950 ml viileää vettä Säilyvyys: 4 viikkoa, tehoaa itiöihin
 Erisan Oxy+ (vetperoksidi ja peretikkahappo)	50 g kerta-annospussi Säilyvyys: 2 % 1 viikko 5 % 2 vrk Varastossa annospussit 2,5 v Tehoaa itiöihin
5. Muut desinfektioaineet	
 OL Antistaatti (isopropyylialkoholi 40%) 100 ml suihkepullo Tilaus Apteekista	Säilyvyys: 2 vuotta Avattuna 1 vuosi Näppäimistöä ja puhelinta varten
 ApoWIPE Ethanol 80 % (alkoholi) Tilausnro 2021871	Yksittäispakattu steriili pyyhe 12x18 cm LTK/800 PKT Desinfiointiin ennen ihon läpäisyä

Muutoshistoria

19.11.2025	Taulukkoa päivitetty kokonaisuudessaan
22.12.2020	Ohje julkaistu